

PROPRIOCEPTION FEEDBACK©




Guida rapida al primo utilizzo



INDICE

Argomenti		Pagina
Di cosa hai bisogno per utilizzare il sistema Proprioception Feedback©?		1
	(A) Personal Computer con possibilità di collegamento Bluetooth	2
	(B) Telecomando Wiimote	3
	(C) Una tavola propriocettiva basculante	4
	(D) Del tracker DeMotu	5
	(E) Del Software Proprioception Feedback©	6
Come ottenere Proprioception Feedback©		7
Installazione del software		17
Il Collegamento tra il Wiimote e il computer		19
Il utilizzo di Proprioception Feedback©		26
Stampa e fissaggio del TrackerDeMotu		29
Registrazione di Proprioception Feedback©		40

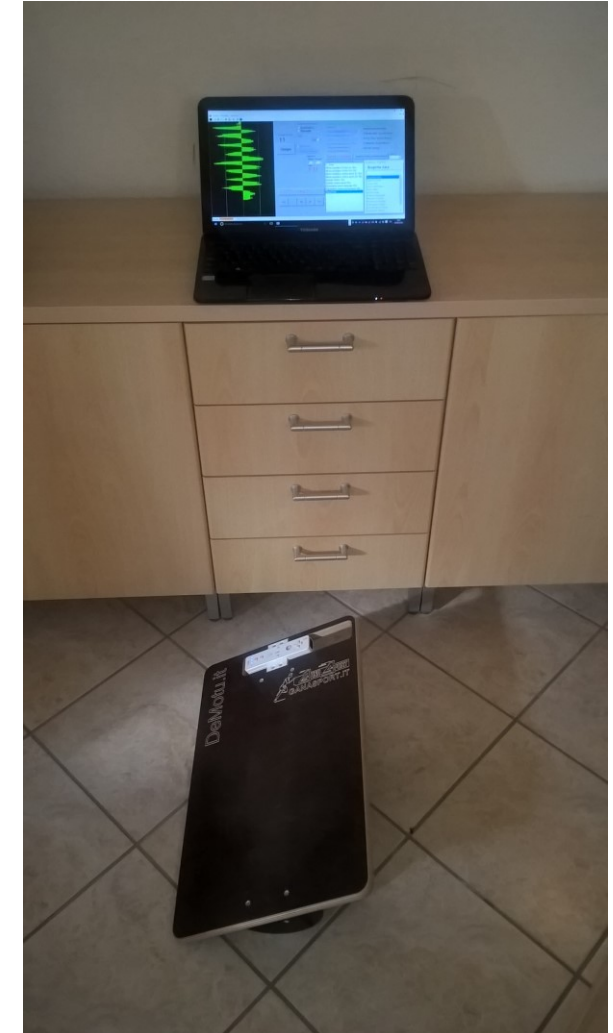

Di cosa hai bisogno per utilizzare il sistema Proprioception Feedback©?



Un personal computer




Bluetooth



Wiiremote Nintendo



Una tavola propriocettiva
tipo Freeman

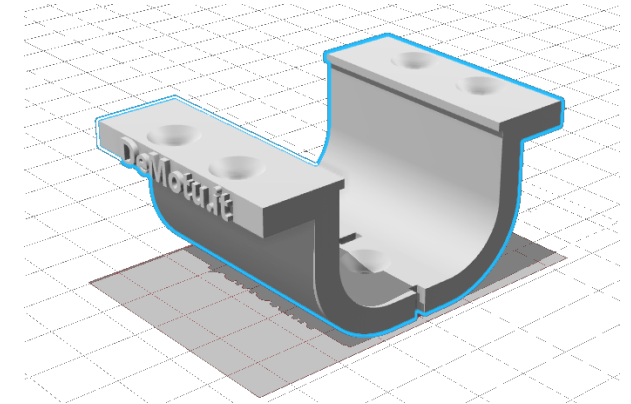

Tracker DeMotu



(A) Prima di tutto hai bisogno di un Personal computer (con possibilità di collegamento Bluetooth) con i seguenti requisiti:

Requisiti hardware

- Un Personal computer con
Processore da 1,6 GHz o superiore
- 1 GB di RAM (1,5 GB se in esecuzione in una macchina virtuale)
- 4 GB di spazio disponibile su disco
- Disco rigido a 5400 RPM
- Scheda video DirectX 9 con risoluzione dello schermo 1024 x 768 o superiore
- **Collegamento Bluetooth**



Requisiti di sistema

- Per la corretta installazione di Proprioception Feedback© sono indispensabili uno dei seguenti sistemi operativi
 - o Windows 10 (consigliato)
 - o Windows 8.1
 - o Windows 8
 - o Windows 7 Service Pack 1



(B)

Hai bisogno del Wiiremote detto anche Wiimote oppure telecomando della Wii

Nota importante, è possibile acquistare il Wiimote in qualsiasi negozio di videogames come ad esempio GameStop oppure su internet al sito www.amazon.it. E' importante che il telecomando sia di prima o di seconda generazione prodotto dalla Nintendo, oppure un **Wiimote compatibile***

*Attenti al telecomando della Nintendo Wiimote

Per il corretto funzionamento del software è possibile utilizzare qualsiasi telecomando sia per quanto riguarda i Wiimote originali Nintendo e sia per quanto riguarda i telecomandi compatibili, eccetto l'ultimo prodotto dalla Nintendo che si riconosce dal pulsante rosso sync che fuoriesce dal vano batteria come indica la figura seguente, infatti il Wiimote indicato non consente alcun funzionamento



Hai bisogno di una tavoletta basculante tipo FREEMAN

- Per l'utilizzo del software può andar bene una qualsiasi tavoletta propriocettiva tipo Freeman con la possibilità di fissare il Tracker Demotu da stampare con la stampante 3D.

Per standardizzare i risultati si consiglia la DeMotu Board una tavola commercializzata dall'azienda GanaSPort alla seguente pagina web

<http://www.ganasport.eu/index.php/shop/sport/calcio-e-calcetto/accessori-calcio-e-calcetto/pedana-demotu-board-oscillante-rettangolare-propriocettiva-%20vendita%20on%20line>



Hai bisogno del Tracker DeMotu


Non è un requisito indispensabile, ma per utilizzare in modo corretto il sistema hai bisogno del progetto 3D del **Tracker DeMotu**,

Il Tracker DeMotu è l'aggancio che permette di fissare una qualsiasi tavoletta propriocettiva tipo Freeman al telecomando della Wii. Il Tracker DeMotu, può essere realizzato grazie al suo progetto 3d scaricabile a questo collegamento


<http://www.demotu.it/wordpress/wp-content/uploads/downloads/2016/10/TrackerDemotu.rar>

servendosi di qualsiasi servizio di stampa 3d, (è importante conoscere che, in opzione, l'azienda GanaSport, insieme alla DeMotu Board, consente anche l'acquisto del Tracker DeMotu)

*Di seguito, verrà descritto come realizzare il **Tracker DeMotu** in modo molto semplice*

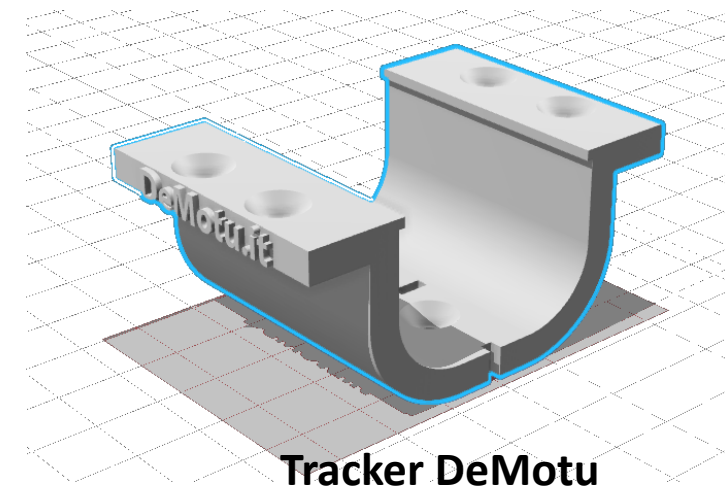

Hai Bisogno del Software Proprioception Feedback©

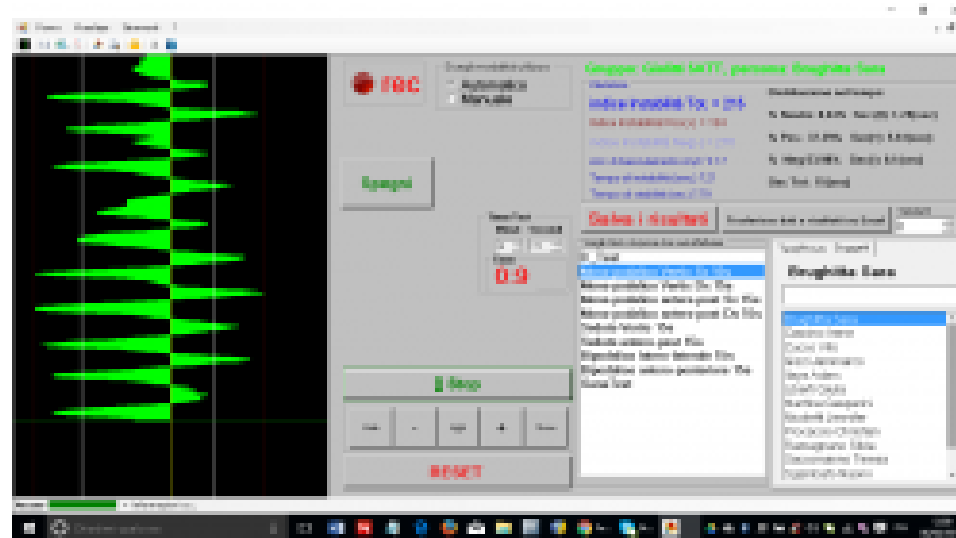

Come ottenere il software Proprioception Feedback©

Se non hai ancora ottenuto una delle versioni di Proprioception Feedback segui le seguenti istruzioni, altrimenti passa direttamente alla sezione **Installazione Proprioception Feedback©**


Le istruzioni per l'ottenimento del software sono riferite alla versione Free la procedura non si discosta di molto per le altre

Per prima cosa vai alla pagina web www.propriocezione.net



Per prima cosa vai alla pagina web www.propriocezione.net oppure alla pagina www.proprioception.it e premi sul pulsante

Download now

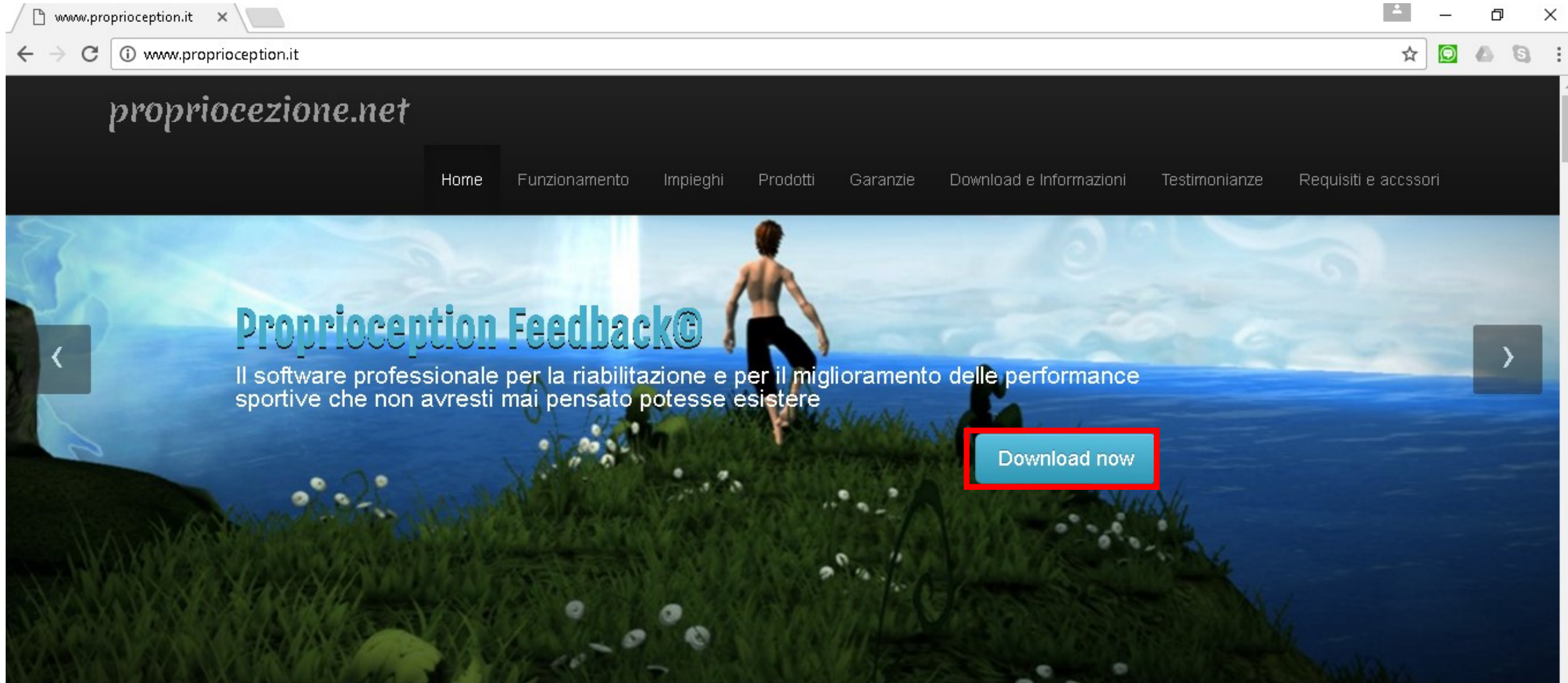

Premere sul pulsante

VERSIONE FREE

www.proprioception.it

propriocezione.net


Home Funzionamento Impieghi Prodotti Garanzie Download e Informazioni Testimonianze Requisiti e accessori

VERSIONE FREE COMPRA ADESSO (per privati) COMPRA ADESSO (per aziende)



Tastiera su schermo

Verrai indirizzato alla seguente pagina

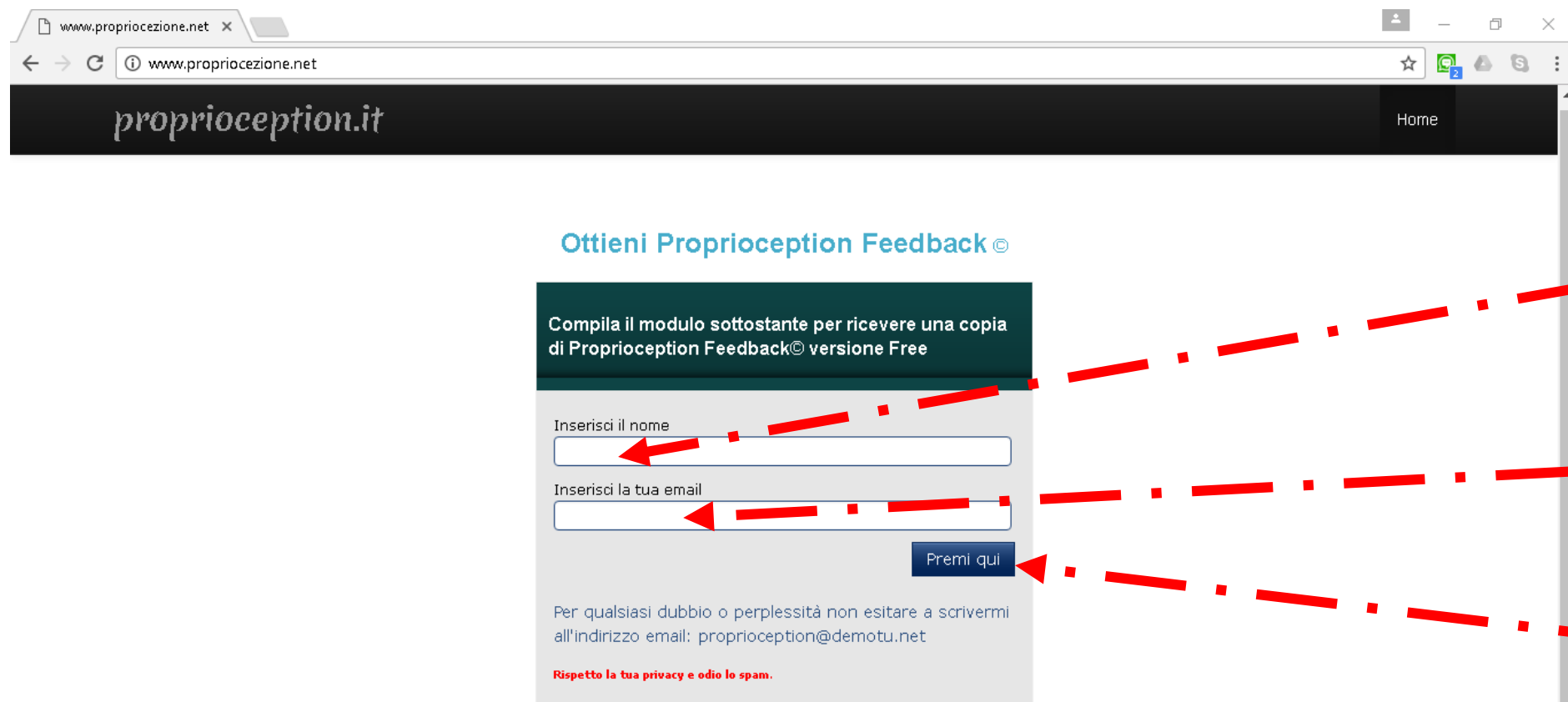

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "www.propriocezione.net". The website header features the logo "proprioception.it" and a "Home" link. The main content area is titled "Ottieni Proprioception Feedback ©" and contains a form for requesting a free copy of the feedback tool. The form includes two input fields: "Inserisci il nome" and "Inserisci la tua email", both with red dashed arrows pointing to them from the right. Below the fields is a blue button labeled "Premi qui". A red dashed arrow points from the text "Quindi premere sul pulsante" to the "Premi qui" button. The button itself is highlighted with a blue box and the text "Premi qui".

Ottieni Proprioception Feedback ©

Compila il modulo sottostante per ricevere una copia di Proprioception Feedback© versione Free

Inserisci il nome

Inserisci la tua email

Premi qui

Per qualsiasi dubbio o perplessità non esitare a scrivermi all'indirizzo email: proprioception@demotu.net

Rispetto la tua privacy e odio lo spam.

Inserire il proprio nome

Inserire la propria email

Quindi premere sul pulsante **Premi qui**



Un messaggio di ringraziamento ci avverte dell'arrivo di un'email all'indirizzo di posta elettronica

Grazie, hai effettuato correttamente la registrazione!

**Una e-mail è stata spedita all'indirizzo
che hai appena inserito nel
box di sottoscrizione.**

**Controlla la posta in arrivo
e apri questa nuova e-mail:
vi troverai il link del software**

Proprioception Feedback©

**Se non ricevi la mail nel giro
dei prossimi 5 minuti, guarda
anche nella casella dello spam!**

Se incontri problemi, segnalalo a: proprioception@demotu.net



Aprire il messaggio di posta elettronica appena ricevuto e seguire le istruzioni

Proprioception Feedback®



Posta in arrivo x



Giulio Rattazzi tramite aweber.com

a me

Ciao Giulio

ti ringrazio per la fiducia posta nei miei confronti e di aver scelto Proprioception Feedback® : mi auguro tanto di non deludenti, è il frutto di un lavoro costato molto tempo e fatica, lo dedico a te e alle persone come te che hanno creduto in questo progetto.

Per ottenere Proprioception Feedback®.

- vai alla pagina web:

<http://www.demotu.it/Prodotti/DownloadSoftwarePFree/>

- Fail Login fornendo come

Username: download4444

Password: proprioception65.it

- La Pagina del download di proprioception Feedback® versione Free che verrà visualizzata presenta nel suo interno una serie di link, per ciascuno di essi è possibile ottenere determinate funzioni:
 - Installazione Proprioception Feedback®
 - Manuale Proprioception Feedback
 - Runtime di Microsoft Access
 - Manuale Tracker DeMotu
 - Progetto Tracker DeMotu
- Tra le funzioni elencate premere sulla prima voce Installazione Proprioception Feedback® che ti consentirà di accedere alla pagina web per scaricare il software
- Quindi premi sul pulsante con scritta "Download Proprioception Feedback®", dopo dopo qualche istante vedrai scaricare, in automatico, sul tuo computer il pacchetto d'installazione SetupPFF
- Terminato il download del pacchetto lanciare il SetupPFF e seguire le istruzioni indicate durante il processo di d'installazione del software



all'interno dell'email sarà indicato

'username e il link che rimanda al pannello di controllo personale.

Quindi fare click sul link dell'email in basso, questo consentirà di accedere al pannello di controllo per la gestione del download,

Una volta raggiunta la pagina attraverso il link indicato ci troveremo alla seguente pagina web

In sostanza

Per ottenere Proprioception Feedback@,

•vai alla pagina web:

<http://www.demotu.it/Prodotti/DownloadSoftwarePFree/>



•Fa il Login fornendo

Username: ricevuta nell'email

Password: ricevuta nell'email

•La Pagina dei download di proprioception Feedback© versione Free che verrà visualizzata presenta nel suo interno una serie di link, per ciascuno di essi è possibile ottenere le seguenti funzioni:


•Installazione Proprioception Feedback©

•Manuale Proprioception Feedback

•Runtime di Microsoft Access

•Manuale Tracker DeMotu

•Progetto Tracker DeMotu

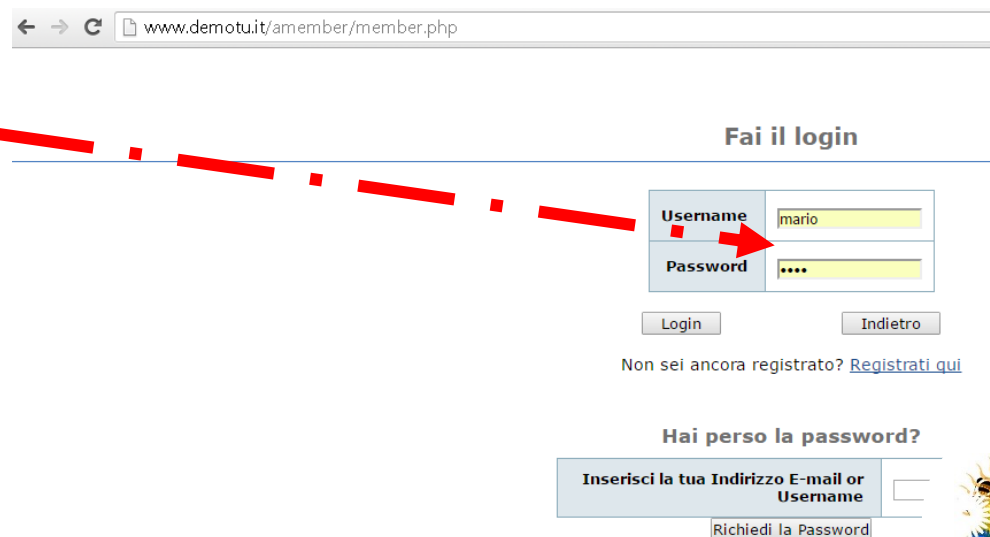

Effettuato il login immediatamente si aprirà il pannello di comando con tutte le sue funzioni disponibili

Ora premere sulla voce **download** che consente di ottenere il software.

← → ↻ www.demotu.it/amember/member.php

Le informazioni sulla tua Membership

[Main Page](#) [Aggiungi e rinnova la tua iscrizione](#) [Lo storico dei pagamenti](#) [Edita il tuo profilo](#)

La tua iscrizione

- **V Standard Proprioception Freeman Feedback**
- [Download](#)
- **AR Standard Proprioception Freeman Feedback**

Link utilizzabili

- [Logout](#)
- [Cambia la password, edita il tuo profilo](#)

Iscrizione alla Newsletter

☐ Cancellati da tutti i messaggi E-mail


[Aggiorna la tua iscrizione](#)

Powered by [aMember Pro](#) membership software

Dopo aver premuto sul link è possibile accedere alla pagina di installazione del software **Proprioception Feedback©**



Dopo aver premuto sul link è possibile accedere alla pagina di installazione del software Proprioception Feedback©

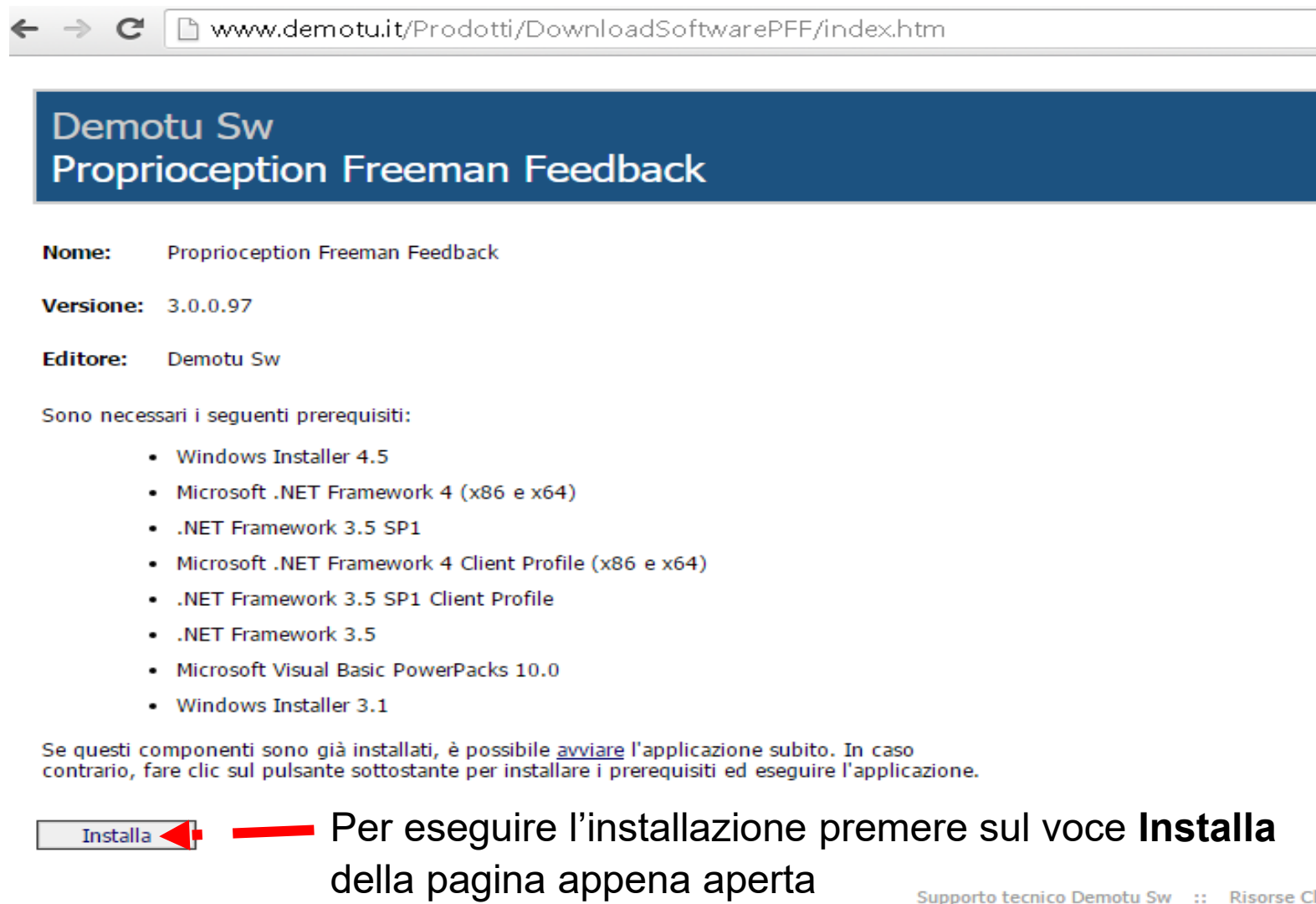

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying www.demotu.it/Prodotti/DownloadSoftwarePFF/index.htm. The page has a dark blue header with the text "Demotu Sw" and "Proprioception Freeman Feedback" in white. Below the header, the following information is listed:

Nome: Proprioception Freeman Feedback
Versione: 3.0.0.97
Editore: Demotu Sw

Sono necessari i seguenti prerequisiti:

- Windows Installer 4.5
- Microsoft .NET Framework 4 (x86 e x64)
- .NET Framework 3.5 SP1
- Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 e x64)
- .NET Framework 3.5 SP1 Client Profile
- .NET Framework 3.5
- Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0
- Windows Installer 3.1

Se questi componenti sono già installati, è possibile [avviare](#) l'applicazione subito. In caso contrario, fare clic sul pulsante sottostante per installare i prerequisiti ed eseguire l'applicazione.

At the bottom left, there is a button labeled "Installa" with a red arrow pointing to it. To the right of the button, a red arrow points to the text: "Per eseguire l'installazione premere sul voce **Installa** della pagina appena aperta".

At the bottom right, there is a footer with the text: "Supporto tecnico Demotu Sw :: [Risorse Clic](#)".



Immediatamente parte il download del pacchetto setup del software

Potrebbe capitare che il download si interrompa a causa di un sistema di protezione del Browser, un messaggio potrebbe segnalarci che siamo di fronte a un file dannoso per il nostro computer, questo non deve preoccuparci perché la fonte del file setup.exe è sicura e garantita,

Demotu Sw Proprioception Freeman Feedback

Nome: Proprioception Freeman Feedback

Versione: 3.0.0.97

Editore: Demotu Sw

Sono necessari i seguenti prerequisiti:

- Windows Installer 4.5
- Microsoft .NET Framework 4 (x86 e x64)
- .NET Framework 3.5 SP1
- Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 e x64)
- .NET Framework 3.5 SP1 Client Profile
- .NET Framework 3.5
- Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0
- Windows Installer 3.1

Se questi componenti sono già installati, è possibile [avviare](#) l'applicazione subito. In caso contrario, fare clic sul pulsante sottostante per installare i prerequisiti ed eseguire l'applicazione.



Pertanto acconsentire la prosecuzione del download completo del software

Demotu Sw Proprioception Freeman Feedback

Nome: Proprioception Freeman Feedback

Versione: 3.0.0.97

Editore: Demotu Sw

Sono necessari i seguenti prerequisiti:

- Windows Installer 4.5
- Microsoft .NET Framework 4 (x86 e x64)
- .NET Framework 3.5 SP1
- Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 e x64)
- .NET Framework 3.5 SP1 Client Profile
- .NET Framework 3.5
- Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0
- Windows Installer 3.1

Se questi componenti sono già installati, è possibile [avviare](#) l'applicazione subito. In caso contrario, fare clic sul pulsante sottostante per installare i prerequisiti ed eseguire l'applicazione.




Installazione di Proprioception Feedback©

- Eseguito il download del software ci apprestiamo a effettuare l'installazione con le seguenti modalità:
- Individuato nel proprio computer il pacchetto d'installazione di PFF (in formato exe, l'eseguibile da poco scaricato) fare doppio click su di esso



- Seguire le istruzioni che vengono richieste di volta in volta, alla fine del processo,
- Alla fine Proprioception Feedback© si avvierà in automatico

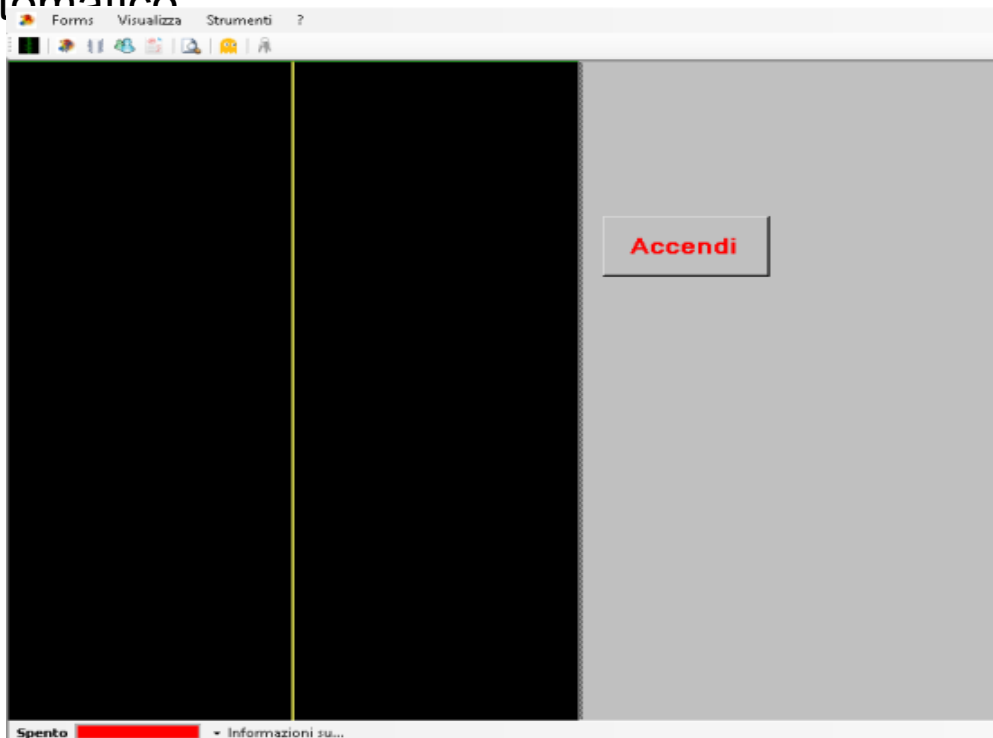

(14%) Installazione di Proprioception Freeman Feedback in corso




Installazione di Proprioception Freeman Feedback in corso

L'operazione potrebbe richiedere vari minuti. È possibile utilizzare il computer per eseguire altre operazioni durante l'installazione.



Nome: [Proprioception Freeman Feedback](#)

Da: C:\Users\Giulio\Desktop\SetupPFF

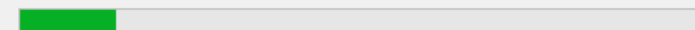

Download in corso: 2,77 MB di 19,4 MB

Annulla




Il primo collegamento tra il computer e il Wiimote




Piccola premessa

- Per utilizzare Proprioception Feedback© è indispensabile collegare il wiiremote della Nintendo al Pc, per questa operazione è necessario che il computer disponga della possibilità di effettuare il collegamento Bluetooth e vi sia installato un sistema operativo a partire dalla versione Windows 7, l'ideale sarebbe che vi sia installata la versione Windows 10
- Di seguito, facendo riferimento a Windows 10, sono riportate le modalità di collegamento tra il Wiimote (anche chiamato telecomando della Wii) e il computer; di seguito vengono riportati alcuni link che fanno riferimento a un altro software "IJumpV2Free© , comunque con lo stesso procedimento di collegamento




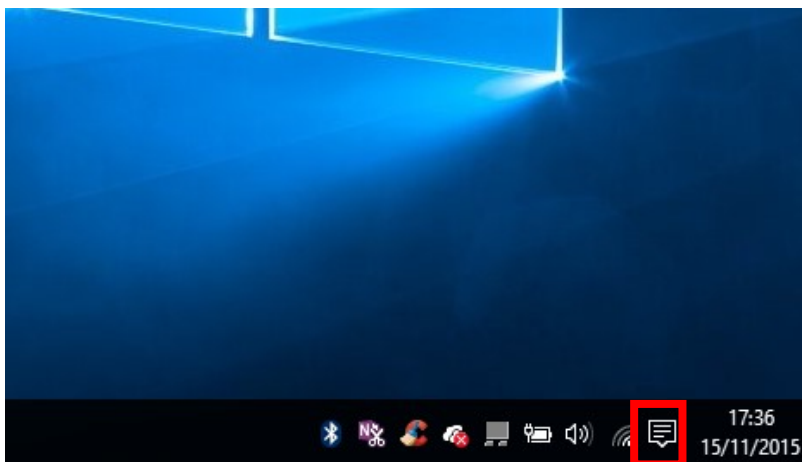

Prima di tutto cliccare sull'apposita icona in basso a destra per aprire il centro notifiche

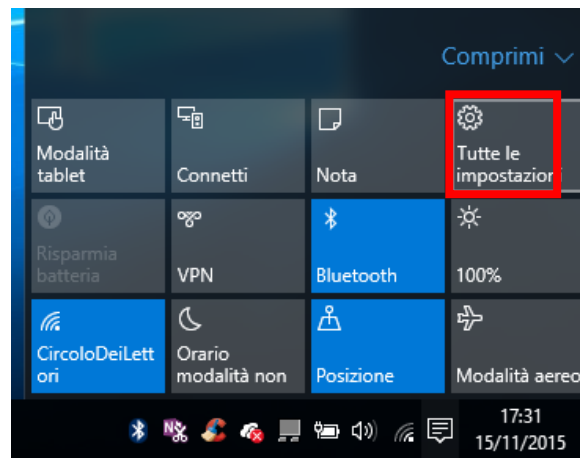


Cliccare su **Tutte le impostazioni**

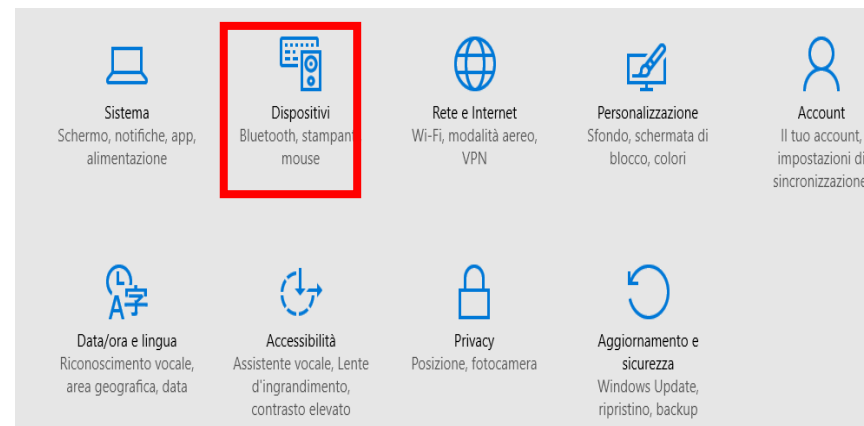


Quindi premere sulla scritta **Dispositivi**



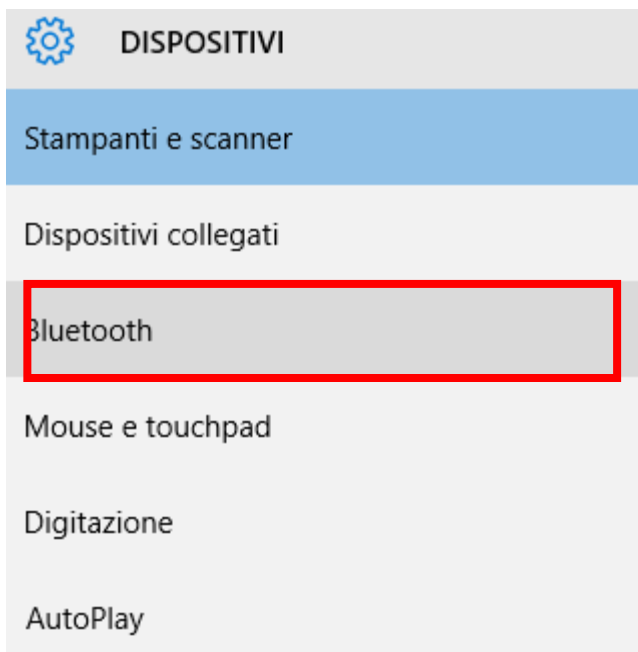

Successivamente premere sulla scritta **Bluetooth** dell'elenco dispositivi a sinistra

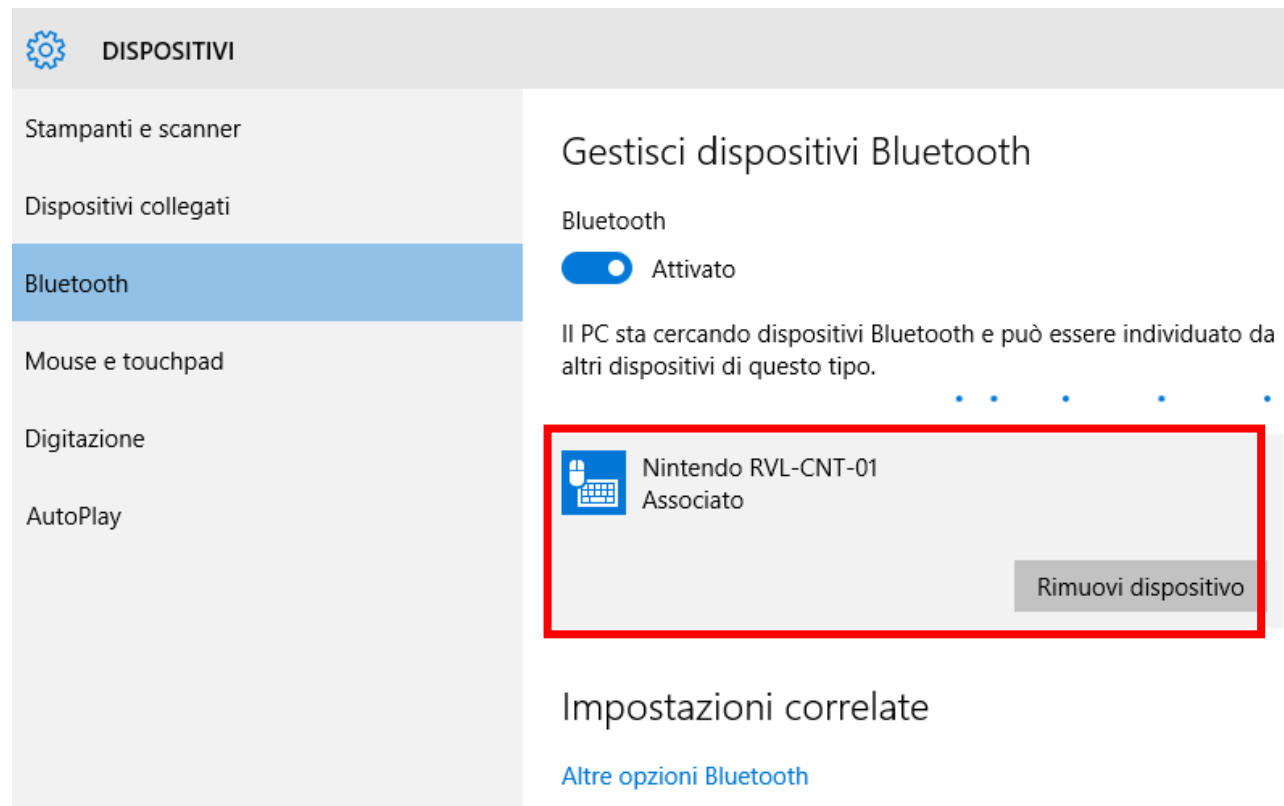

Prima di passare al collegamento è necessario eliminare sempre l'eventuale precedente collegamento cliccando su **Rimuovi dispositivo** della scritta **Nintendo RVL-CNT-01**

A seguito della rimozione del collegamento è possibile crearne uno nuovo

Assicurarsi che il Dispositivo **Bluetooth** del computer sia attivo, quindi sul telecomando premere ripetutamente e contemporaneamente sui pulsanti **1** e **2** del Wiiremote (l'operazione di premere i 2 pulsanti in modo intermittente è necessario ripeterla fino all'avvenuto collegamento)



Gestisci dispositivi Bluetooth

Bluetooth

☒ Attivato

Il PC sta cercando dispositivi Bluetooth e può essere individuato da altri dispositivi di questo tipo.



Nintendo RVL-CNT-01
Pronto per l'associazione

Impostazioni correlate

[Altre opzioni Bluetooth](#)

Dopo qualche istante, una scritta con dicitura Nintendo **RVL-CNT-01** Pronto per l'associazione ci avverte che è possibile effettuare il collegamento tra il computer e il Wiiremote. Quindi cliccare sulla scritta appena citata e successivamente sul pulsante **Associa**



Nintendo RVL-CNT-01
Pronto per l'associazione


Associa

A seguito dell'avvenuta pressione del tasto **Associa**, una schermata blue ci chiede di inserire il pass-code, in questo caso non bisogna scrivere nulla ma semplicemente cliccare sulla scritta

Avanti

Quindi il sistema si appresta a effettuare il collegamento

Quando l'operazione è andata a buon fine, la scritta **Connesso** ci avverte del collegamento avvenuto

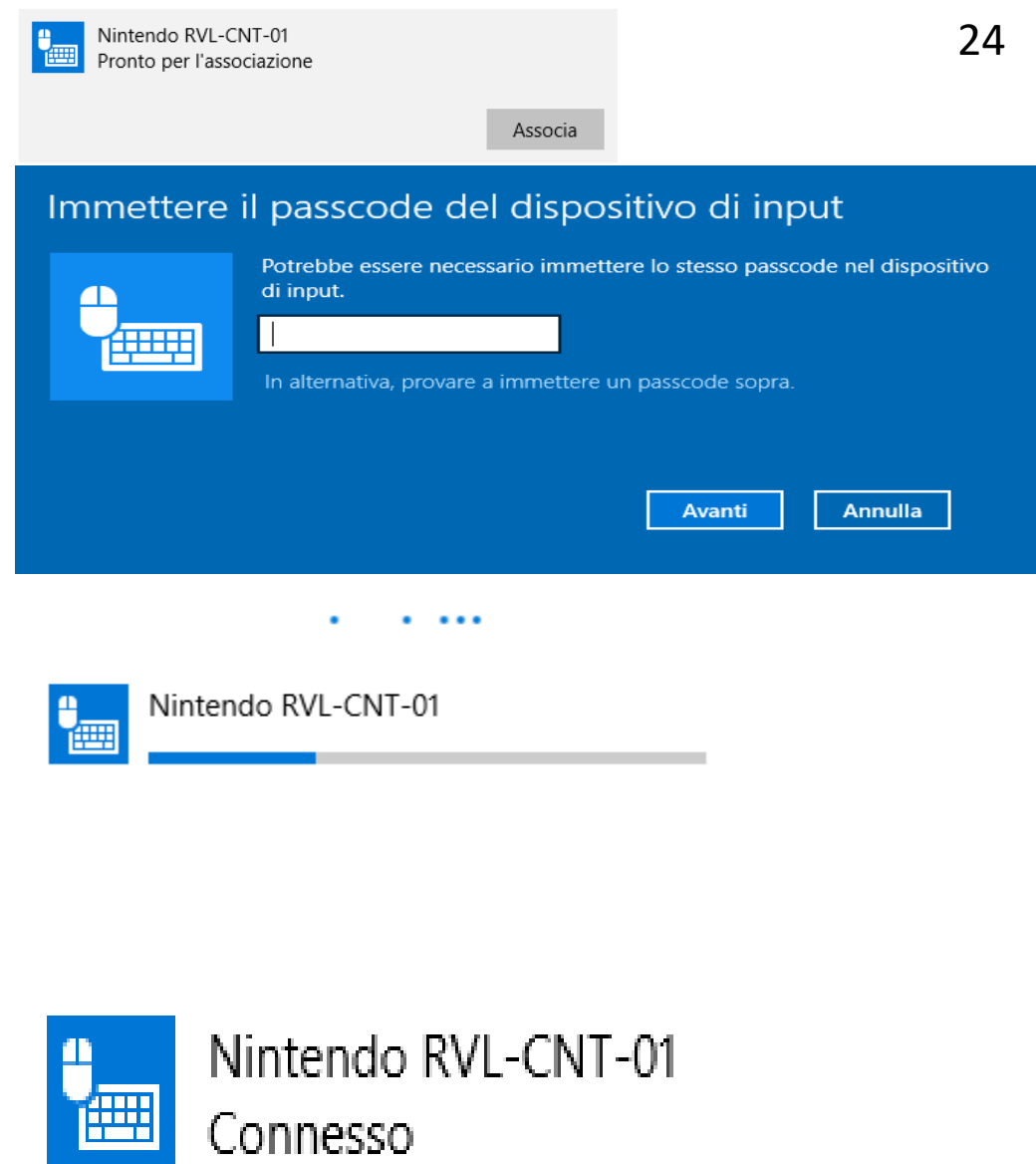



Scorciatoia al processo di collegamento tra il Pc e il Wiimote attraverso il Bluetooth

Per collegare il telecomando della Wii al computer, esiste un'altra modalità, direttamente dal software senza andare a cercare il pannello di comando del proprio pc,

prima di tutto aprire il software Proprioception Feedback© e premere sul pulsante **Accendi**, immediatamente il software si accorgerà che non esiste nessun collegamento fra i 2 e un messaggio vi avvertirà di questo inconveniente.

Quindi premere sul pulsante **OK** del messaggio appena comparso per vedere comparire un altro pulsante raffigurante il simbolo del **Bluetooth**.

Cliccare sul pulsante appena comparso, il software vi indirizzerà direttamente nella sezione interessata del pannello di controllo dove è possibile effettuare il collegamento con le stesse modalità viste in precedenza a differenza del fatto che l'interfaccia grafica, secondo queste modalità cambia leggermente rispetto a quelle illustrate ma il processo di collegamento tra il telecomando e il Pc rimane sostanzialmente uguale. Ricordo che ogni volta che si effettua un nuovo collegamento, **ricordarsi sempre di rimuovere il precedente attraverso la voce rimuovi dispositivo del pannello** come indica la figura qui a lato

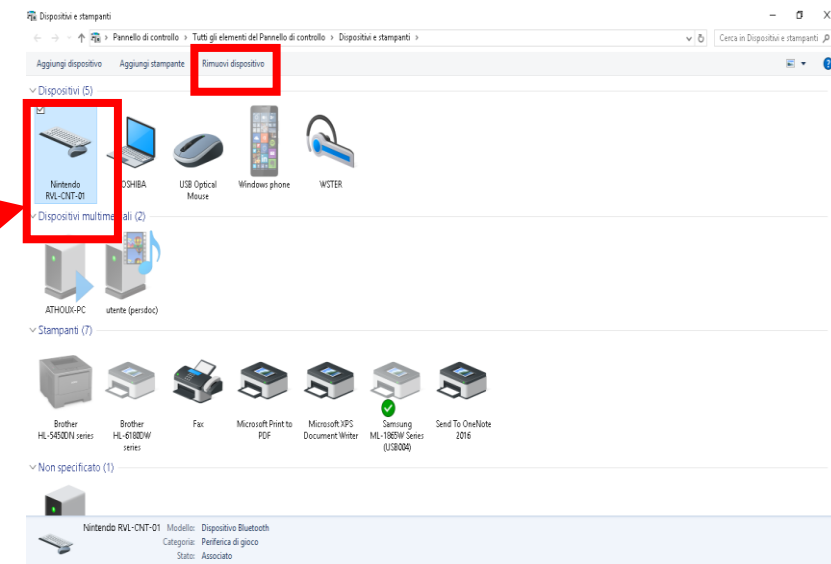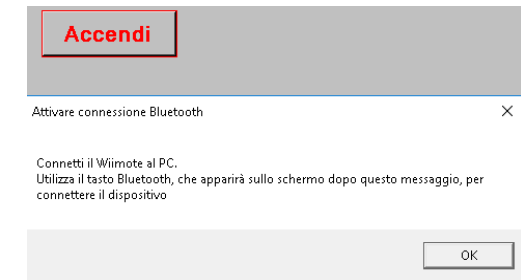

Il utilizzo di Proprioception Feedback©

Proprioception Feedback ©

Esaminati tutti gli aspetti propedeutici al funzionamento del software, attivato il collegamento attraverso il Bluetooth tra il PC e il telecomando della Wii, affrontiamo l'aspetto dell'utilizzo di proprioception Feedback©.

Primo utilizzo modalità manuale

Dopo l'apertura del software attraverso l'icona sul Desktop




Aprire il software cliccando su **Accendi**



Autosettaggio

Un istante dopo si apre il Form di settaggio automatico. In questa fase non bisogna fare nulla, ma semplicemente consentire al software di fare tutto

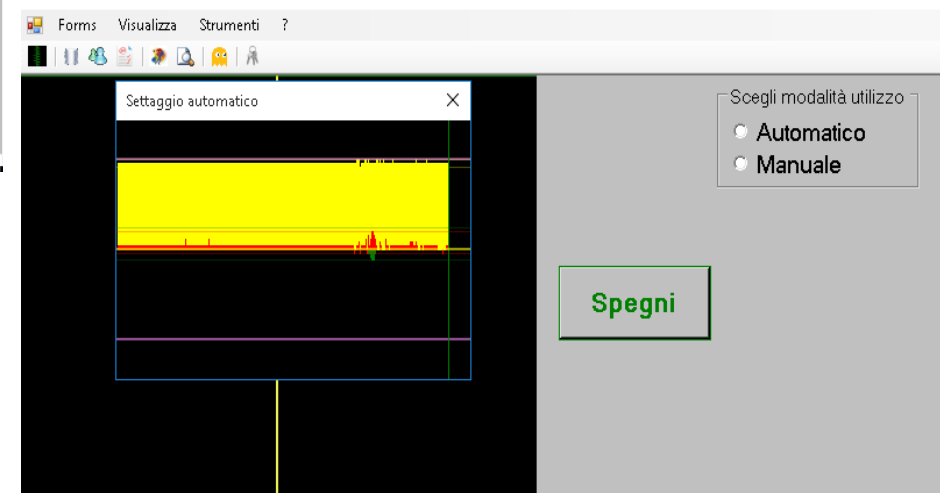


Modalità Manuale

Concluso il processo di settaggio è possibile avviare il software in modalità manuale, una modalità che consente di cambiare le opzioni di funzionamento del software a proprio piacimento e, eventualmente, anche in corso d'opera, perciò non segue modalità preimpostate. Cliccando sulla voce **Manuale** è possibile scegliere 3 opzioni di funzionamento: **Riferimenti**, **Training** e **Test/Timer**



Opzione Training


Esaminiamo l'opzione **Training**. A tal fine scegliere la voce **Training**

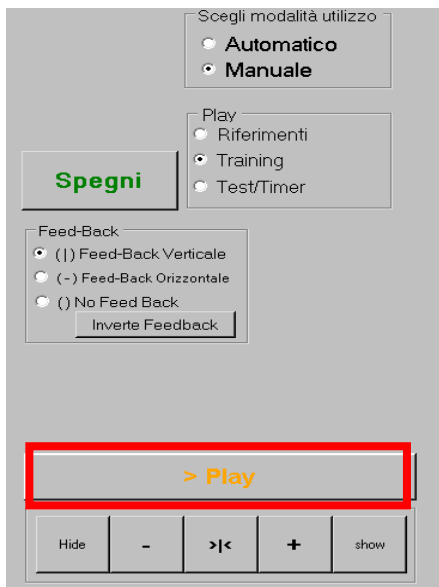


Feedback verticale

Prima scegliere la prima voce : **Feed-Back Verticale** successivamente cliccare su **Play**.

Dopo qualche istante il software entra in funzione, un Feedback verticale del basculamento della tavola viene proiettato sul display del computer. L'inclinazione e la velocità di movimento della tavola vengono rappresentate in modo speculare a secondo del movimento a destra o a sinistra

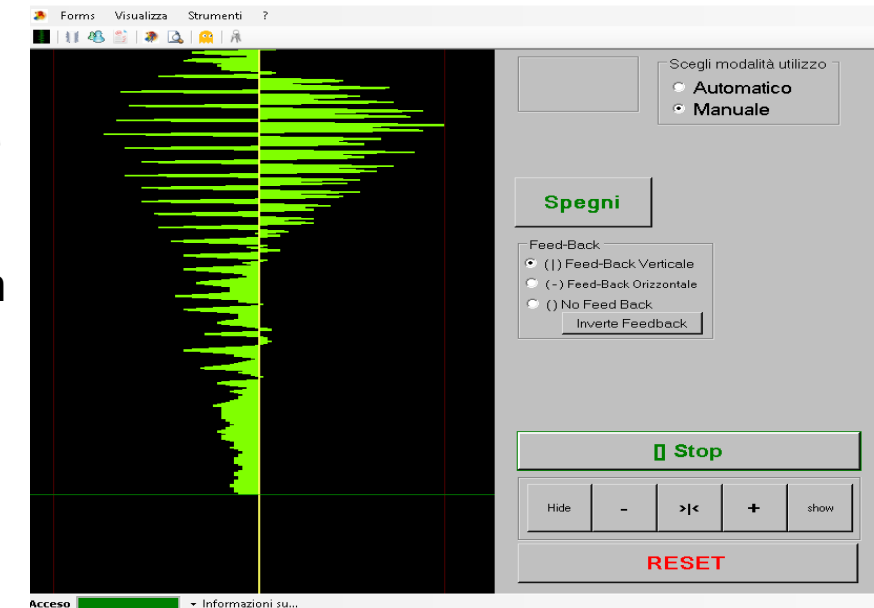


- Una retta verticale di colore giallo, posizionata centralmente al display, indica la linea di demarcazione tra la parte destra e la parte sinistra, mentre una linea di colore verde scorrevole anticipa il feedback per indicare lo scorrere del tempo e facilitare l'individuazione della posizione del Feedback, 2 rette verticali di colore rosso posizionate sia nella parte destra e sia nella parte sinistra stanno a indicare le maggiori accelerazioni a destra e a sinistra del basculamento. È facile notare che il software è provvisto di un sistema di **autorange**, o meglio di un sistema che si adatta graficamente nel display a modo dell'intensità del movimento della tavola.
- Dalla versione Basic a salire, il software non ha limiti di tempo, mentre è limitato a circa 8 secondi per la versione **Free**.
- È possibile fermare il feedback in qualsiasi momento cliccando su **[] Stop**, per riprendere l'attività ripremere su **Play**

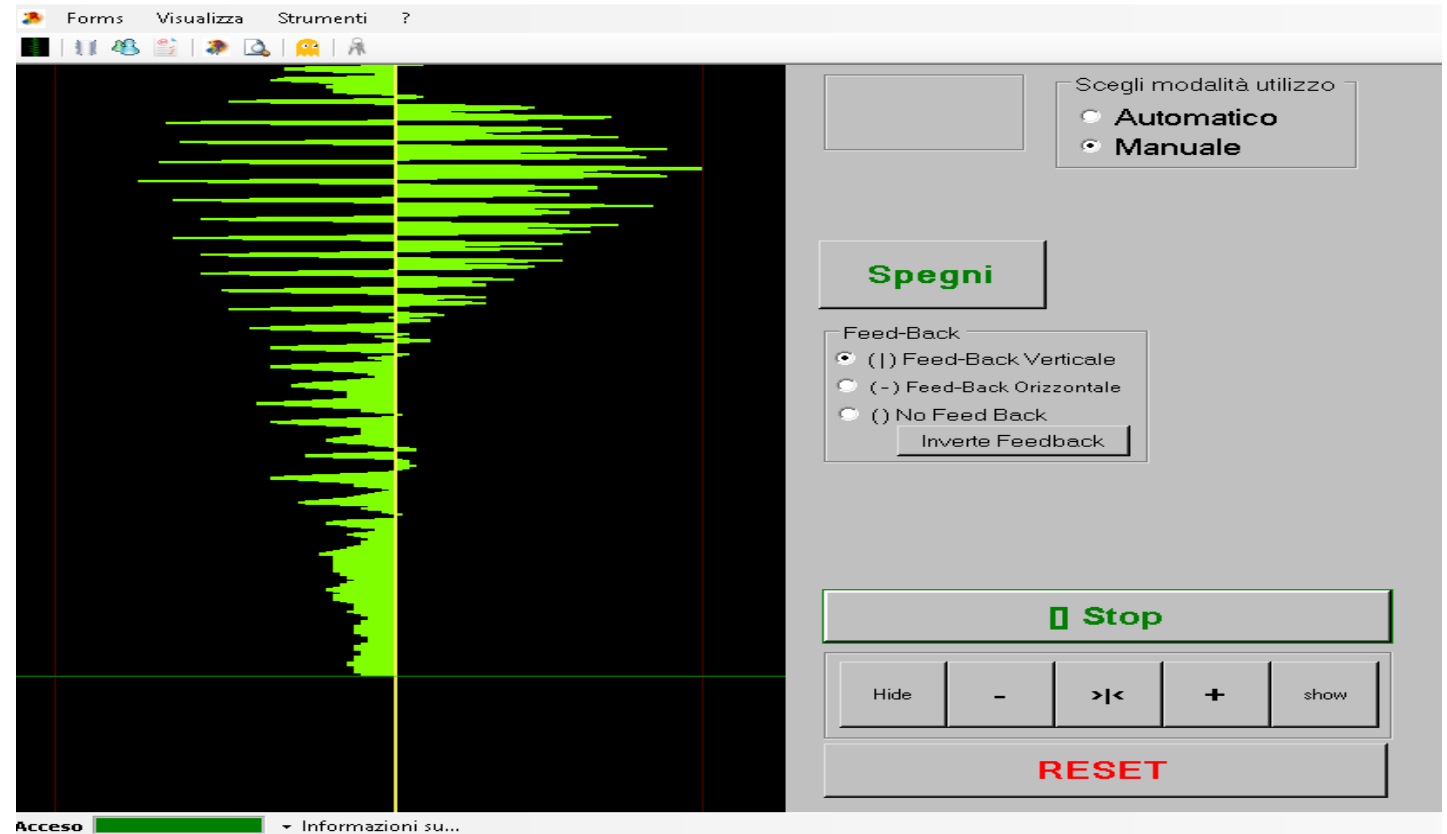




Stampa 3D Tracker Demotu

Pochi semplici passaggi per semplificarvi il lavoro

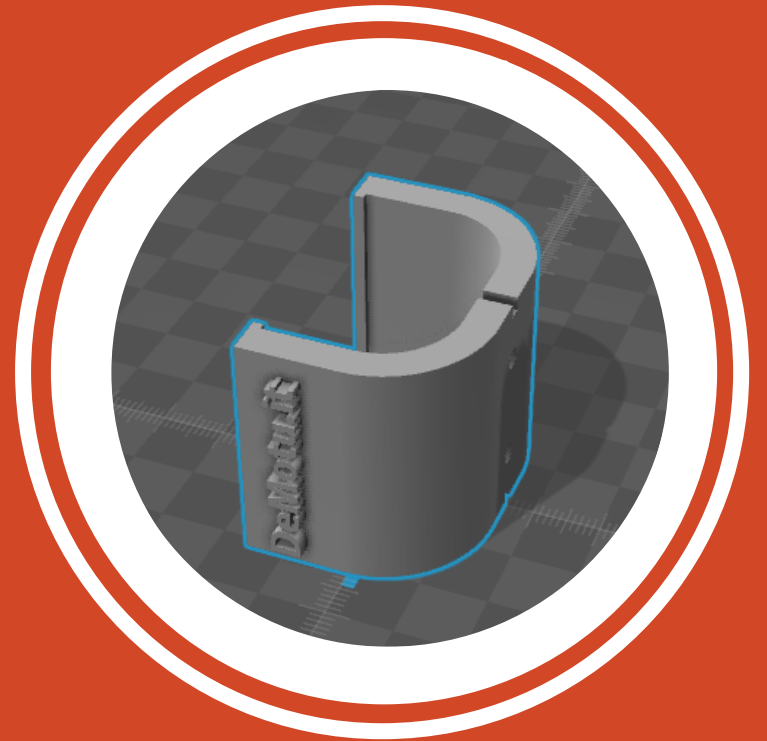

Istruzione per fissare il Track Demotu alla tavola propriocettiva tipo Freeman

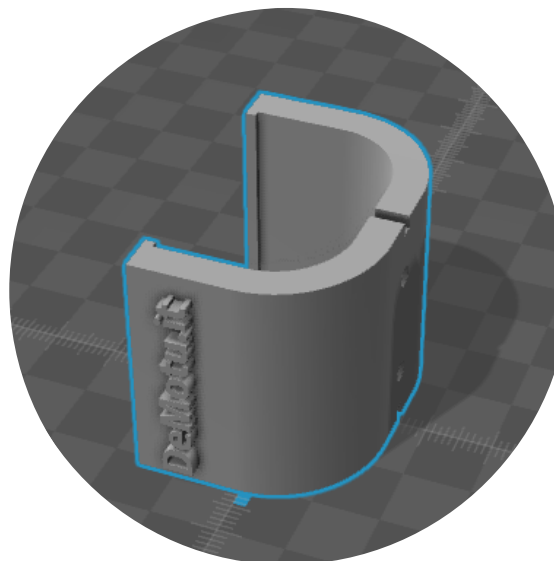

Prima di tutto scaricare il progetto del Track DeMotu...

Il progetto è scaricabile alla pagina web:

<http://www.demotu.it/wordpress/pagina-dei-download-di-proprioception-feedback/>

Oppure attraverso il pannello di controllo

<http://www.demotu.it/amember/member.php>

In entrambi i casi è necessario inserire le proprie credenziali



Inserire le proprie credenziali...

← → ↺ | demotu.it/amember/login.php?amember_redirect_url=/wordpress/pagina-dei-download-di-proprioception-feedback | 📖 ☆ | ☰ ✎ 🔔 ...

🔍 Google ☆ Registro Elettronico 🌐 Google Traduttore 📺 YouTube 🗂️ User Control Panel 🇮🇹 demotu 📊 Histats - Pannello di 📧 Posta in arrivo ☆ MasterCom Ver. 🌐 myposte ☆ traduttore google -

Lingua: Italiano ▾

Fai il login

Username	
Password	

Non sei ancora registrato? [Registrati qui](#)

Hai perso la password?

Inserisci la tua Indirizzo E-mail or Username	
--	----------------------

© CGI-Central.NET, 2002-2016



Dalla Pagina Web dei download...

Premere sulla voce **Progetto Tracker DeMotu** per scaricare il file zippato del progetto da far stampare con stampante

3D

 demotu.it/wordpress  20  1  Nuovo  Modifica pagina Salve giulio.rattazzi 

Download Proprioception Feedback©

 Mi piace  Condividi Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

  Tweet  



Download per il corretto funzionamento di Proprioception Feedback©


- Manuale di Proprioception Feedback©
- Installazione Proprioception Feedback©
- Runtime di Microsoft Access**
- Manuale installazione 3D Tracker DeMotu
- Progetto Tracker DeMotu

Pagine acquisto e pannello personale

- Pannello personale
- Pagina acquisti
- www.proprioception.it



Progetto Tracker DeMotu

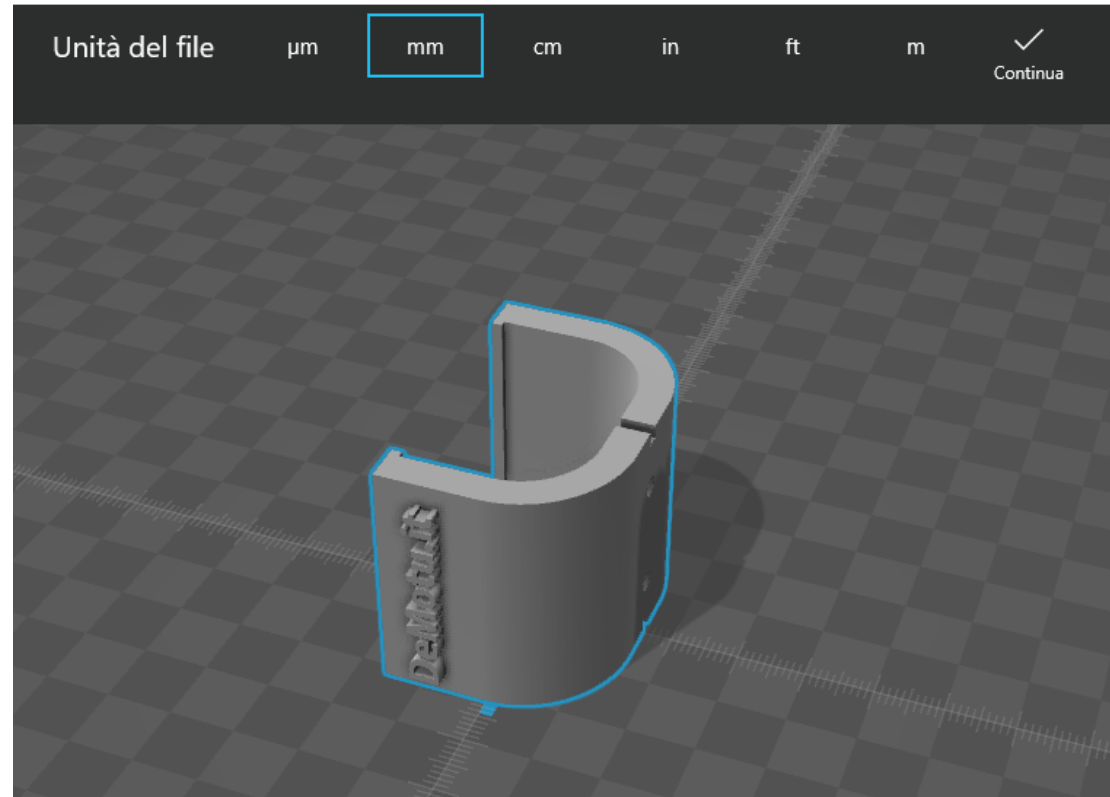





Il file del progetto Tracker DeMotu va stampato con stampante 3D



Consegnare in tipografia il progetto Tracker DeMotu

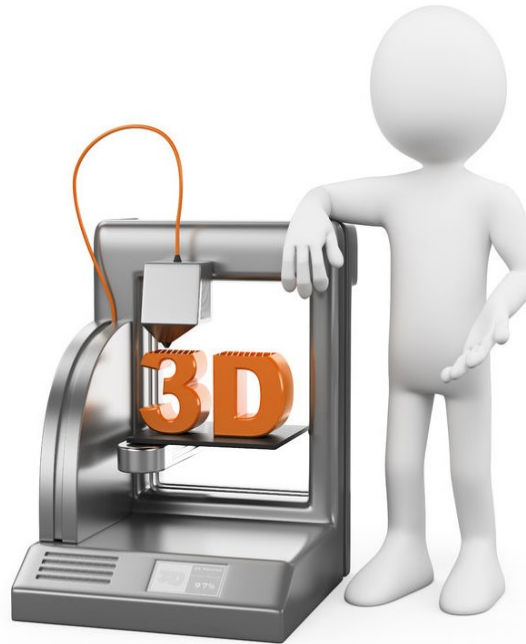


Stampa in 3d del Tracker DeMotu

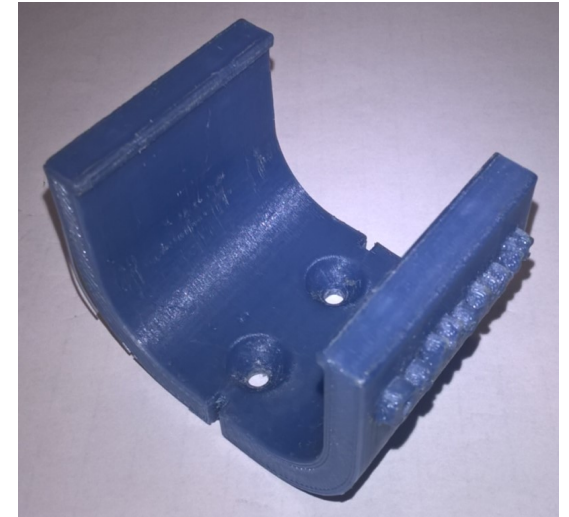


Tracker DeMotu dopo la stampa

Come fissare il Tracker DeMotu sulla tavoletta propriocettiva tipo Freeman

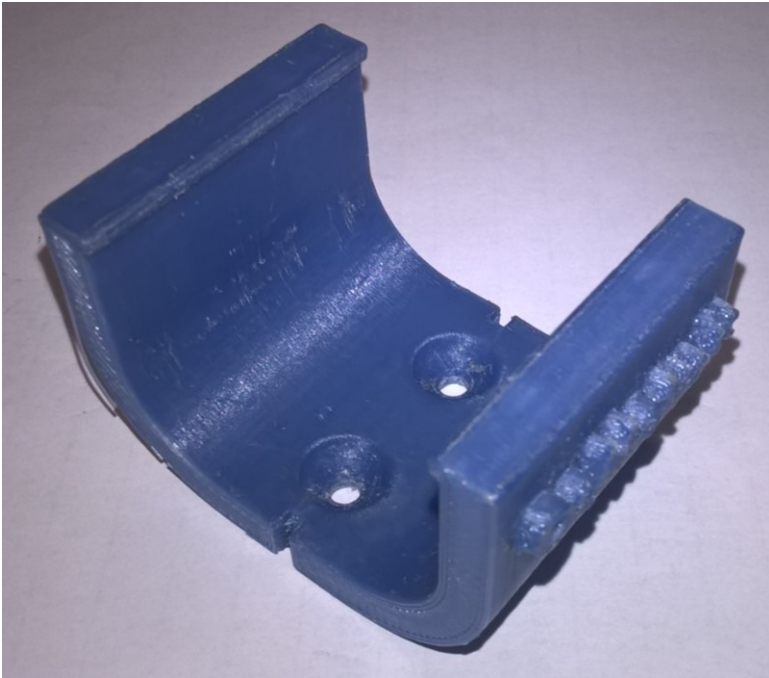


Prendere il Tracker DeMotu

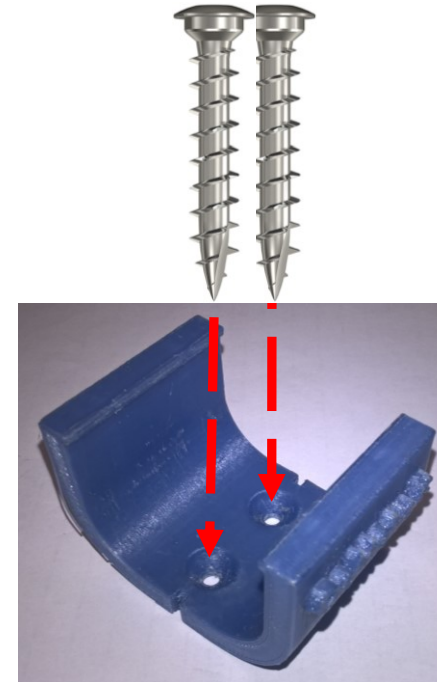

**Procurarsi 2 viti da inserire
all'interno degli appositi fori del
Tracker Demotu**



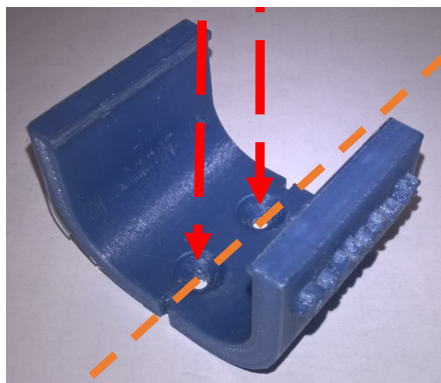


Il **Tracker DeMotu** va fissato centralmente rispettando la linea mediana della tavola come indica l'immagine




Il wiimote va inserito al centro del Tracker DeMotu



Il wiimote va inserito infilandolo attraverso le opportune guide fino a raggiungere il centro del Tracker DeMotu facendo in modo che la tavola propriocettiva in posizione parallela al terreno non restituisca nessuna traccia orizzontale sul display del software durante il funzionamento

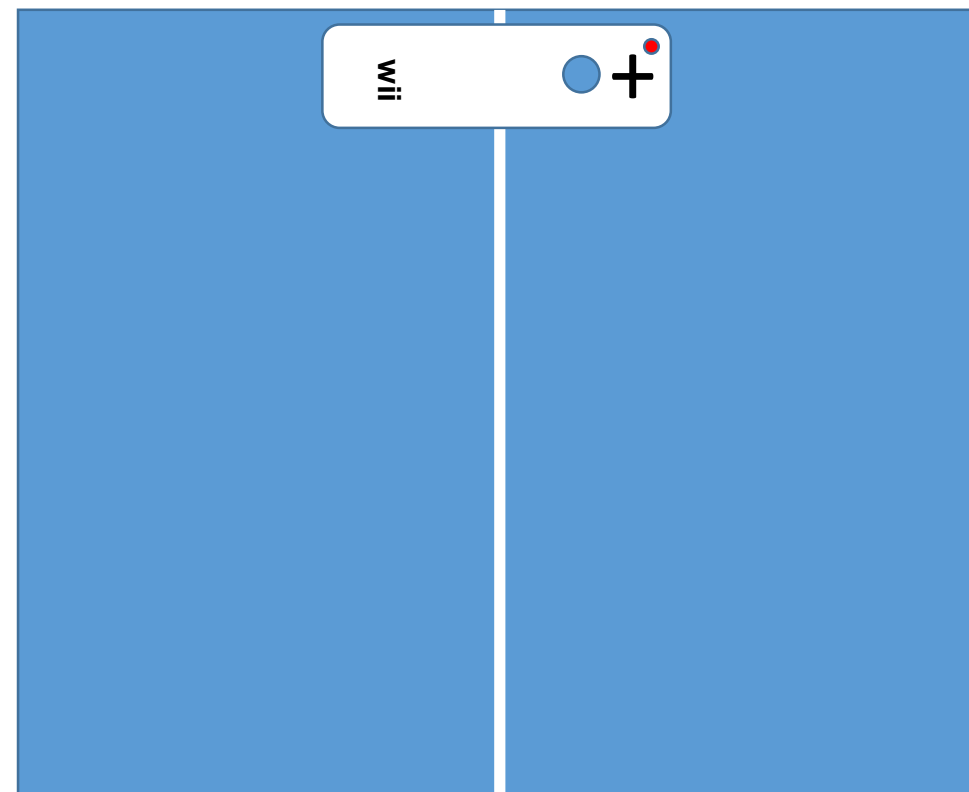

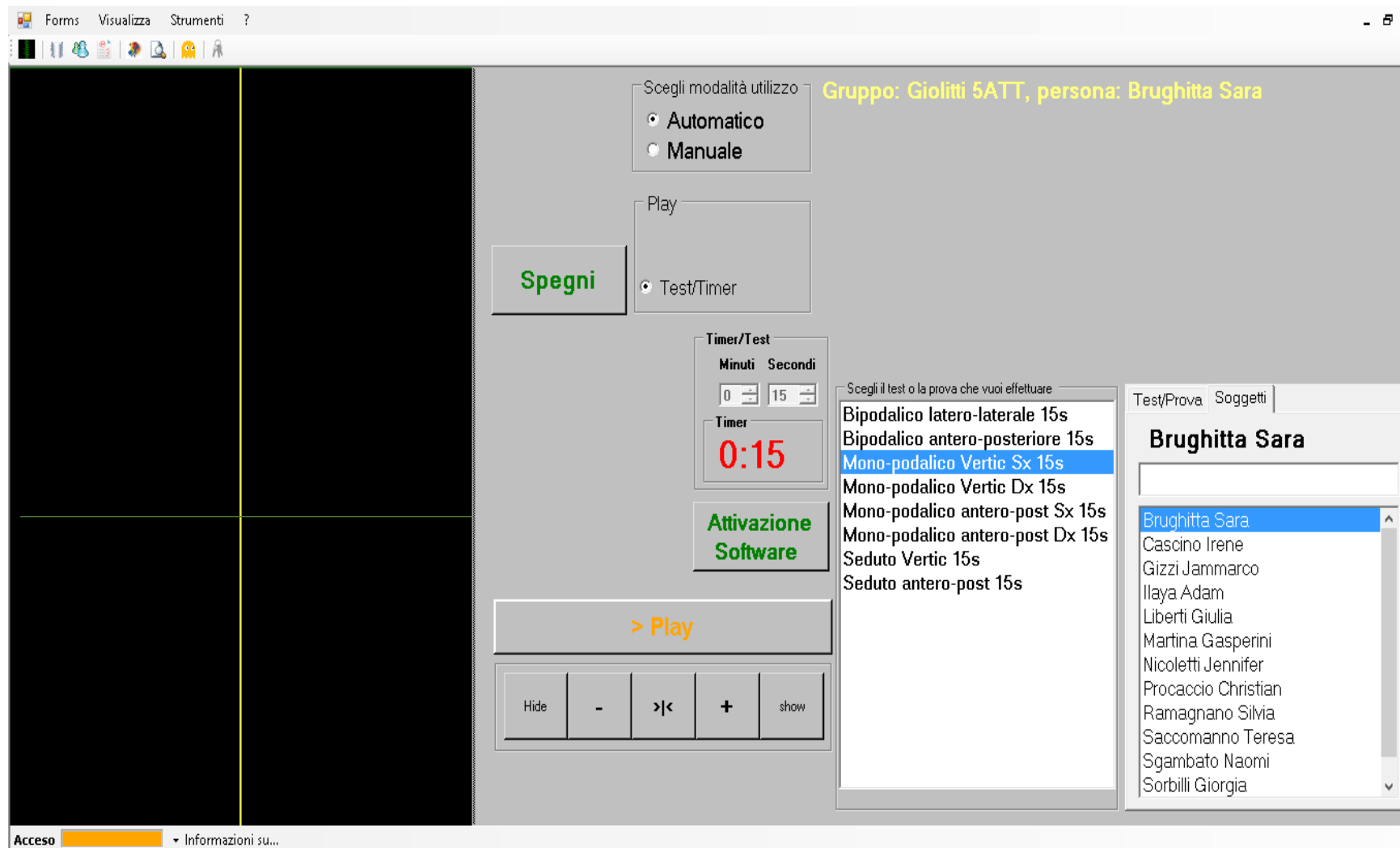

Esempio della traccia 0 sul display di Proprioception Feedback© in funzionamento quando il wiimote è stato inserito in modo corretto nel Tracker DeMotu




Registrazione di Proprioception Feedback©

Registrazione

Proprioception Feedback© per funzionare in modo permanente necessita l'esecuzione di 2 processi obbligatori, **la registrazione e l'inserimento della chiave di licenza**

Per questa guida vediamo solo la registrazione


Prima di tutto per accedere nel Form di **registrazione** fare click sull'icona rappresentante le chiavi come mostra la figura in basso

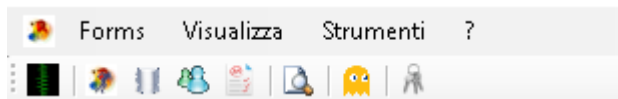

Dopo qualche istante verrà aperto il **Form di Attivazione Proprioception Feedback©**, anche chiamato **form di registrazione**

Per avviare la registrazione di Proprioception Feedback© è necessario avere il computer collegato a internet quindi cliccare sulla scritta **“Avvia attivazione Software”**, immediatamente un

messaggio ci avverte che sta per iniziare il processo di attivazione. Cliccare su **OK**,

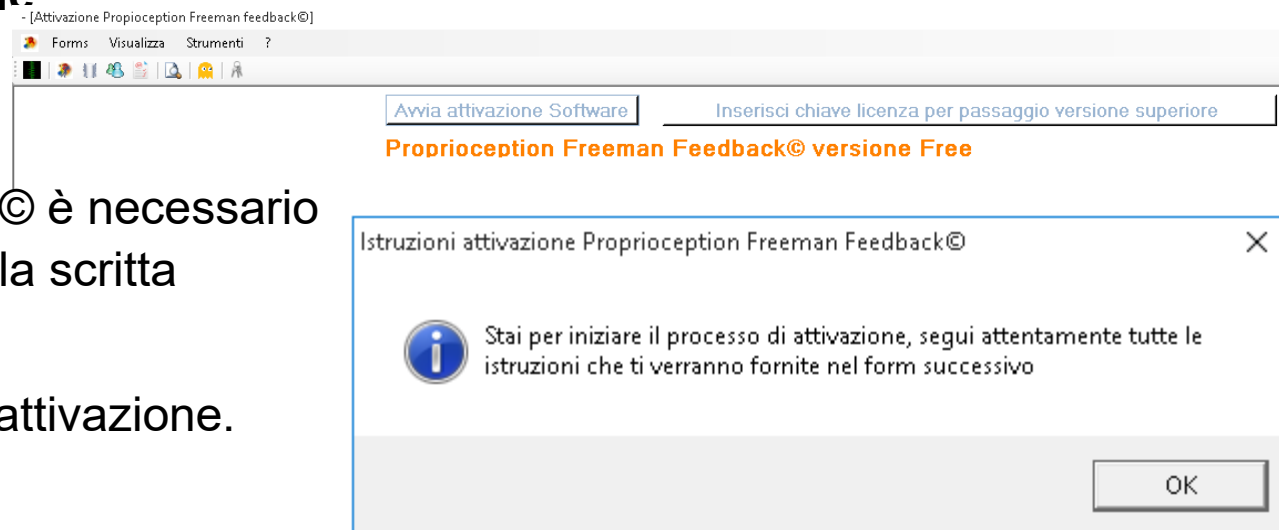

Dopo qualche secondo, secondo la velocità di connessione, è possibile effettuare la registrazione di PFF© compilando tutti i campi del modulo: il proprio nome, l'email personale, fornita in precedenza durante la richiesta del download del programma, e la chiave primaria del software di colore rosso in alto a sinistra del form.

Chiave Primaria: 0306A6A030/3

Proprioception Freeman Feedback© versione Free

Registrazione del software

Compila il modulo sottostante per registrare Proprioception Freeman Feedback©

*Campo obbligatorio

Inserisci il tuo nome *

Inserisci la tua email *

Bisogna inserire la stessa email fornita in precedenza per il download

Inserisci il codice di chiave primaria *

Il codice di chiave primaria è quello che vedi di colore rosso in alto a sinistra del video

Riscrivi il codice di chiave primaria *

Il codice di chiave primaria è quello che vedi di colore rosso in alto a sinistra del video

Invia

Quando tutti i campi sono stati completati in modo corretto premere su **INVIA**, dopo qualche istante un messaggio ci avverte che il programma è stato registrato con successo (Il messaggio di avvertimento può essere di diverse tipologie)

Esempio di messaggio di avvenuta registrazione

Registrazione del software

Proprioception Freeman Feedback© è stato registrato in modo corretto

Questo modulo è stato creato utilizzando Moduli Google.